

CÂNULA DE INFUSÃO INTRAÓSSEA

INTRAOX™



3P3[®]
medica

LEALMEDICAL

CÂNULA DE INFUSÃO INTRAÓSSEA

A infusão intraóssea é um procedimento médico que administra fluidos, medicamentos ou hemoderivados diretamente na medula óssea quando o acesso intravenoso é difícil ou tardio.

Usado em emergências como choque, parada cardíaca ou trauma grave para garantir a rápida circulação de tratamentos que salvam vidas. A infusão intraóssea é normalmente realizada em ossos grandes e de fácil acesso, com ricas cavidades medulares. Os locais comuns incluem a tíbia proximal (logo abaixo do joelho), o úmero proximal (parte superior do braço) e o esterno (em alguns casos). O fêmur distal e a tíbia distal também podem ser usados, especialmente em pacientes pediátricos.

INTRAOX™

É um dispositivo descartável utilizado para fornecer e infundir líquidos e medicamentos em situações de emergência, quando o acesso vascular comum não está imediatamente disponível. O acesso intraósseo pode ser uma alternativa adequada e rápida para tratar pacientes em choque e em estado crítico.



Técnica cirúrgica:

- Identifique o local de inserção. O local preferencial para infusão intraóssea em crianças menores de 6 anos é a superfície anteromedial da tíbia proximal, logo abaixo da tuberosidade tibial. Outros locais adequados incluem a tíbia distal (1 a 2 cm acima do maléolo medial em crianças maiores e adultos), o fêmur distal e o úmero proximal.
- Desinfete a pele e aplique anestesia local se o tempo permitir.
- Estabilize o membro e insira a agulha INTRAOX™.
- Avance a agulha com pressão e rotação controladas até sentir uma perda repentina de resistência, indicando entrada na cavidade medular.
- Remova o estilete.
- Conecte uma seringa apropriada ao cone Luer-lock e comece a administração de fluidos conforme necessário.

INTRAOX™

MEDIDOR	DIÂMETRO (mm)
14G	2,00
16G	1,60



INTRAOX™



INDICAÇÕES:

O INTRAOX deve ser usado para a administração e infusão de fluidos em nível intraósseo em situações de emergência em que o acesso vascular tradicional é impossível ou quando não é possível obtê-lo em um curto espaço de tempo.

Ele deve ser usado exclusivamente por médico. Use a infusão intraóssea somente como um acesso transitório para a infusão de líquidos.

BENEFÍCIOS:

- ▶ Os orifícios na cânula permitem uma infusão mais rápida e uma distribuição multidirecional dos líquidos injetados.
- ▶ O cabo ergonômico melhora a aderência e a precisão do acesso intraósseo.
- ▶ Um conector luer-lock universal adequado para qualquer tipo de seringa.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

O local indicado para infusão do INTRAOX é:

- ▶ Crianças Menores de 6 anos: A superfície antero medial e da tíbia proximal, imediatamente abaixo da tuberosidade tibial.
- ▶ Crianças Maiores de 6 anos e Adultos: Além dos locais acima indicado também a superfície a tíbia distal 1-2 cm acima do maléolo medial e o fêmur distal e o úmero distal.

INTRAOX™



<https://www.lealmedical.com>



LEALMEDICAL

+55(11)98994-4059.
+55(11)99991-9344.
+55(11)99555-7943.



comercial@lealmedical.com



@lealmedical

Av.Copacabana 268. Empresarial 18 do
Forte,Sala 502/503/1302.
Alphaville-Barueri-SP. CEP: 06472-001.